




Probenverpackung:

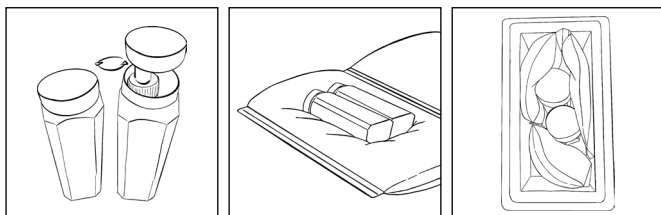

Vorgehen:

- Bitte lagern Sie das Versandmaterial und die EDTA-Blutröhrchen bei Raumtemperatur (**NICHT KÜHLEN!**)
- Stecken Sie je ein EDTA-Blutröhrchen in eine **Versandhülse** und verschrauben Sie diese
- Wickeln Sie die beiden **verschlossenen** Versandhülsen in das Gelpack
- Stecken Sie die umwickelten Hülsen in die **Styroporbox**
- Stellen Sie die Styroporbox in den Karton und legen Sie den **ausgefüllten Untersuchungsauftrag** sowie ggf. Arztbriefe bei
- Versenden Sie die Blutproben bitte möglichst **sofort nach der Abnahme**
- Bereits freigemachte Päckchen können Sie ohne zusätzlichen Abholauftrag einem **DHL Zusteller** mitgeben oder bei jeder **DHL Station** abgeben
- Das Päckchen sollte binnen **48-72 Stunden nach Blutabnahme** im Fachlabor eintreffen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Webseite www.maintrac.de

Labor Dr. med. Ulrich Pachmann
Kurpromenade 2 · 95448 Bayreuth
Telefon: +49 921 850 200



Für alle Untersuchungen benötigen wir:

- **15 ml EDTA-Blut**
(Röhrchen beschriftet mit Patientennamen, Geburtsdatum und Abnahmedatum)
- **Untersuchungsauftrag**
(Vollständig ausgefüllt, Unterschrift des/der Patienten/-in)

Hinweise zur maintrac® Wirkstofftestung:

- Bei Fragen zu Wirkstoffen bitten wir um **Rücksprache** mit unserem Fachlabor Dr. Pachmann unter der +49 921 850 200.

Empfehlungen für den Zeitpunkt der Blutabnahme:

- direkt vor einer neoadjuvanten Chemotherapie
- direkt vor einer Operation
- 3 Wochen nach einer Operation
- 2-3 Wochen nach einem Chemotherapie Zyklus
- 2-3 Wochen nach Abschluss einer Therapie
- Während einer Hormon- oder Erhaltungstherapie ist die Blutabnahme jederzeit möglich.
- Auch in einer therapiefreien Zeit ist die Blutabnahme jederzeit möglich.

Befundübermittlung:

- Die Befundübermittlung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche **digital** (DSGVO-konform) oder **per Post**.
- **Medizinische Fragen** richten Sie bitte direkt an das Fachlabor Dr. Pachmann unter der **+49 921 850 200**. Wir sind von Mo-Fr 08:00 – 15:00 Uhr telefonisch erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.maintrac.de